

小さな音が大きく聞こえる!

耳穴式 | 充電式 集音器

GRFD-SC A1 BK
GRFD-SC A1 WH
GRFD-SC A1 BE



商品特性

- 抗菌効果99%の抗菌コート加工で清潔に使える
- 両耳でも片耳だけでも使用可能
- プッシュ式ボタンで簡単操作
- ケースに入れるだけの簡単充電
- マスクをしても邪魔にならない
- イヤホンタイプなので集音器を使っていると気付かれにくい
- 音量調整アナウンスが流れるので、音量調整がわかりやすい

こんな方におすすめ

- テレビの音が大きいと言われる
- 何度も聞き直してしまう
- 周囲の音が聞き取りにくい

動画版
取扱説明書



| 商品仕様 | |
|---|---|
| 集音器タイプ | カナル型 |
| 集音器本体質量(片耳) | 約4.0g |
| 使用温度範囲/湿度範囲 | 5~40℃/20~80%(ただし結露なきこと) |
| ヘッドホン部 | |
| ドライバー型式 | バランスドアマチュア型 |
| ドライバーサイズ | 7.4×2.96×2.58mm |
| 音圧感度 | 109dB |
| インピーダンス | 22Ω |
| 再生周波数帯域 | 20Hz~20kHz |
| マイクロホン部 | |
| マイク感度 | -38dB |
| ヘッドホン部(その他) | |
| 集音器本体/バッテリー量(片耳) | 45mAh |
| 連続使用時間 | 約5時間 |
| 充電仕様 | |
| 充電電圧 | DC5V |
| 集音器本体充電時間 | 充電ケースでの充電:約1.5時間 (充電ケースが満充電の状態、最大3回まで充電可能) |
| 充電ケース充電時間 | 約2.5時間 |
| 充電ケース内蔵バッテリー量 | 400mAh |
| 充電ケースサイズ(W×D×H) | 66.5×31.5×28mm |
| 充電ケース質量 | 約35.6g |
| 充電ポート | MicroUSBポート |
| 付属品 | |
| イヤークリップ | S/M/L(Mサイズは本体に装着済み) |
| 充電ケーブル | 充電用MicroUSBケーブル(約0.42m) |
| 取扱説明書兼保証書 保証期間6ヶ月 | |
| 製品仕様や材質は予告なく変更する場合がございます。 商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。 | |

本製品は集音器です。

周囲の音を収集し、増幅する機器となります。
聴覚障害者向けの補聴器(医療機器)ではありません。
使用される方の聴力の度合いによって効果が表れにくい場合がありますので、あらかじめご了承ください。

連続使用時間
約**5**時間

5段階
音量調節

プッシュ式
ボタンで
簡単操作

両耳でも
片耳でも
使える



充電残量が確認できる
デジタルディスプレイ



抗菌


細菌の繁殖を抑える
抗菌仕様です。



1. 付属の3種類のサイズのイヤークリップからご自身の耳穴にしっかりハマるイヤークリップを選びます。



2. ケースから取り出して、耳に装着します。両耳でも、片耳だけでも使えます。

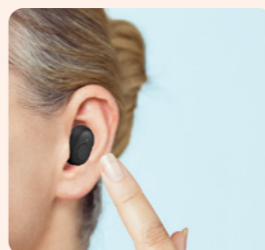

4. 周囲の環境に合わせて、集音レベルを操作してください。
※お好みの音量を5段階から選びます。
ボタンを短押しします。



ボタンを押すたびに音声アナウンスが流れ、図のような音量が切り替わります。



3. スイッチを入れます。
ボタンを長押しします。



〈ハウリングの抑制について〉
キーンという不快なハウリングを抑えるには耳に装着した状態でスイッチを入切するとハウリングを抑えられます。

5. スイッチを切ります。
ボタンを長押しします。



集音器を
ケースに戻します。

